

**Annexe :**
Recommandations pour un lève-personne sur rail

Numéro de dossier

Renseignements sur la personne admissible

Nom	Prénom	Date de naissance (AAAA-MM-JJ)
-----	--------	--------------------------------

Type d'appareil (A)

Modèle	Nombre de fonctions
<input type="checkbox"/> Portatif <input type="checkbox"/> Fixe	<input type="checkbox"/> Deux <input type="checkbox"/> Quatre (pour moteur fixe seulement)

Points de chute (B)

Lit	Bain
Table à langer	Toilette
Autre (aux frais des clients)	

Toiles (C)

Nombre	Modèle
--------	--------

Accessoires complémentaires (D)

<input type="checkbox"/> Tringle de rideau de douche rétractable	<input type="checkbox"/> Tige pour décrocher le moteur
--	--

Valider les caractéristiques auprès du fournisseur spécialisé

Renseignements sur l'ergothérapeute responsable des recommandations

Nom (en lettres moulées)		Prénom (en lettres moulées)		Numéro de permis	
Nom du lieu de travail					
Adresse			Municipalité		Code postal
Ind. rég.	Numéro de téléphone	Poste	Ind. rég.	Numéro de télécopieur	Courriel
Signature				Année	Mois Jour

Programme d'adaptation de domicile

Aide-mémoire sur certains standards pour un lève-personne sur rail

A. Type d'appareil

Modèle et nombre de fonctions	Portatif : pièces non contiguës, deux fonctions seulement
	Fixe : pièces connexes, deux ou quatre fonctions
	Quatre fonctions, contexte admissible : autonomie complète de la personne pour réaliser un transfert (validée, avec tâches connexes), point de chute difficile d'accès, personne obèse ou limitation des capacités de la personne aidante

B. Points de chute

Admissibles : fauteuil roulant, lit, toilette, bain, table à langer. Recommandations (variable selon chaque situation)

Lit	Entre 910 mm et 1065 mm (36 et 42 po) du pied du lit
Bain	560 mm (22 po) du mur opposé aux robinets, centré en largeur ou selon le type d'assise
Table à langer	au centre
Toilette	environ 50 mm (2 po) du rebord de la cuvette, centré en largeur
Autre :	Aux frais du propriétaire : divan, tapis de jeu, etc.

C. Toiles

Nombre et modèle	Nombre : 2 (1 toile pour les transferts au sec et 1 toile pour les transferts au bain) Modèle : au choix de l'ergothérapeute
------------------	---

D. Accessoires complémentaires

À spécifier	Tringle de rideau de douche rétractable dans le cas où il y a un point de chute au bain Tige pour décrocher le moteur portatif
-------------	---

Note : Valider auprès d'un fournisseur les points de chute et le ou les trajets possibles. Plus ce dernier est simple, plus l'installation sera utilisée.